


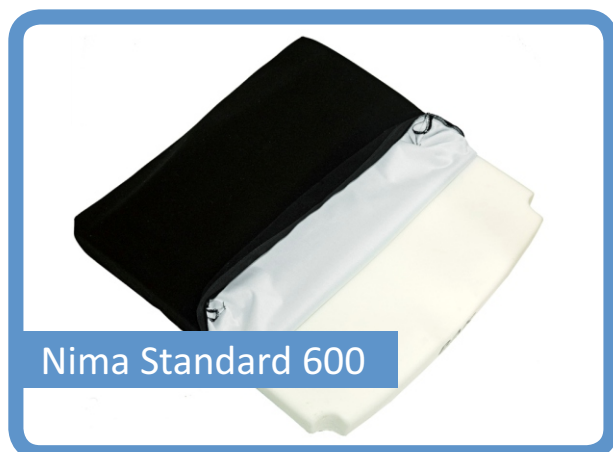

Nima Standard 600

Dyna Nima Standard 600

Tryckfördelande rullstolsdyna (AB)

Bas i polyuretan, formgjuten efter kroppen.

Överdrag och bas som andas.

En stabil dyna för aktiva brukare.

Fakta / Teknisk dokumentation

Dynans Bas

Fasade kanter på dynans undersida för att passa i både hängmattesits och plansits.

Material

Dyna: Slabstocksgjuten polyuretan i dynbasen
Brandskyddat skum

Överdrag: Brandskyddad polyester som andas mycket väl.

Tvättråd

Dynan kan ytdeinficeras med på marknaden förekommande medel men ej tvättas i maskin.

Överdraget tvättas i maskin 60 grader och kan torktumlas.

Dynans vikt

0,6-1,2 kg, beroende på storlek.

Brukarvikt

Max 150 kg upp till och inklusive storlek 45x45 cm

Max 200 kg i storlek 45x45<50x45 cm

Max 250 kg i storlek 50x45 cm och över

- Tillbehörsförteckning:

- Standard överdrag luftgenomsläppligt
- Inkontinensöverdrag
- Hygienhätta

Dynan är trycksårsförebyggande genom:

1. Dyna och överdrag andas.
2. Mjukt material.
3. Dynans form motverkar skjuv.

Beskrivning

Nima Standard är en tryckfördelande rullstolsdyna för aktiva brukare som inte behöver justering av sitsen.

Dynan kan användas i rullstol med hängmattesits, plansits samt övriga sitsar. För att ge tryckavlastning och positionerat sittande. Dynan kan beskäras

Överdraget och dynan andas.
Dynan har anatomisk form för att fördela brukarens vikt effektivt över hela sittytan.

Produkten kommer färdig, inga inställningar behövs innan användning

Nima Standard finns i storlekar som passar barn och vuxna samt tyngre brukare.

Bruksanvisning / Instruktioner för handhavande / Skötselinstruktioner/Monteringsanvisning

1. Tag ur dynan ur påsen. Dynan ligger i sitt överdrag och överdraget är märkt med etiketter som visar hur dynan skall placeras på stolen. Iakttag denna märkning, det är viktigt att dynan placeras rätt.
2. Kontrollera storleken på dynan, om den inte passar så välj en annan storlek.
3. Överdraget är som standard EJ inkontinensskyddat.
4. Rengöring och skötsel. Vid behov eller mellan två brukare, tvätta för hand och desinficera t.ex med Virkon. Plantorka dynbasen. Överdraget kan tvättas i maskin i 60 grader och tål torktumling och torkskåp.
- 5 Skrotningsanvisning. Uttjänt dyna sorteras under brännbart
Dynan kan beskäras med bibehållen CE märkning