




Nima Allround 621

Dyna Nima Allround 621

Tryckavlastande allrounddyna med trögsaum i bakkant och bendelare i framkant. Avsedd för bruk i rullstolar

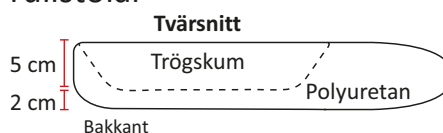

Dynan är trycksårspåbyggande genom:

1. Trögsaum i bakkant, anatomisk form i framkant.
2. Dyna och överdrag andas - bra mikroklimat.
3. Mjukt material som anpassar sig efter tryck.
4. Brukaren sjunker ned i dynans bakkant vilket stoppar framåtgång.

Beskrivning

Dynan är en allrounddyna till aktiva och inaktiva brukare som inte behöver justering av sitsen.

Dynan erbjuder ett komfortabelt och trycksårspåbyggande alternativ till basdynorna. Och ett mer lättanvänt och säkrare alternativ till avancerade inställningskrävande dynor.

Överdraget och dynan andas. Sittbensknöarna avlastas av 5 cm högkvalitativt trögsaum som tillsammans med dynans bas på 2 cm polyuretan ger hela

7 cm mjukt material under sittbensknöarna.

Detta ger en oerhört mjuk och skön sits med väldigt stor avlastning för sittbensknöarna samtidigt som skjuvkraften framåt minskar då brukaren sjunker ned i dynans bakkant och inte glider framåt.

Tillbehörsförteckning

- Inkontinensskyddat överdrag
- Standardöverdrag
- luftgenomsläppligt

Teknisk Specifikation/varudeklaration

Dynans Bas

Fasade kanter på dynans undersida för att passa i både hängmattesits och plansits.

Material

Dyna: Slabstocksgjuten polyuretan i dynbasen, högkvalitativt trögsaum i bakkant. Allt skum har öppna celler som andas.

Överdrag: Polyestertyg som andas mycket väl.

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år



Vikt: 0,7-1,5 kg beroende på storlek

Förväntad livslängd 5 år

Dynan kan användas i andra sittmöbler och beskåras med bibehållen CE

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745

Tvätttråd

Dynbasen kan ytdeinficeras med på marknaden förekommande medel men ej tvättas i maskin. Dynbasen lufttorkas

Överdraget tvättas i maskin 60 grader och kan torktumlas.

Brukarvikt

Max 150 kg upp till och inklusive storlek 45x45 cm

Max 200 kg i storlek 45x45<50x45 cm

Max 250 kg i storlek 50x45 cm och över

Brukarinformation/bruksanvisning: Dynan kommer färdig i sin förpackning, det finns inga lösa delar att ställa in. Det enda viktiga att tänka på är att placera dynan enligt dynans etikettering (fram, bak, upp, ner) i rullstolen.

Vid behov kan dynan beskåras med bibehållen CE. Detta kan tex vara PU (det hårdare) skummet bakom svanskotan för att avlasta denna.

Destruering. Dyna som skall destrueras sorteras under brännbart.