


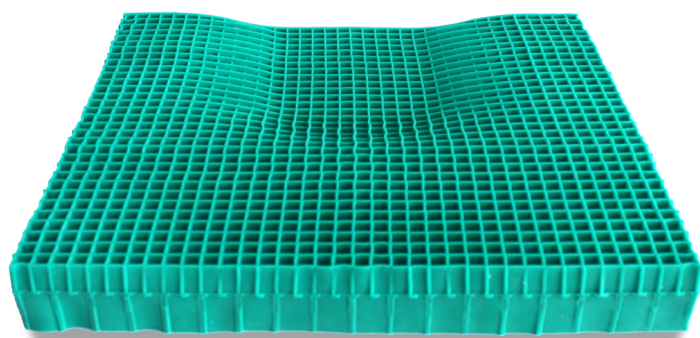

Nima EquaGel Standard

Tryckfördelande / Tryckavlastande dyna i gel för längre tids sittande i rullstol. Konturerad sittgrop i komfortskiktet. Höjd 5 cm

EquaGel™ är en torr - polymergel som känns nästan gummiliknande vid beröring.

Den viktigaste funktionen är samarbetet cellerna emellan. Varje vägg av en cell är i stånd att stödja endast en lätt belastning, när detta tröskelvärde överskrids fördelas belastningen till omgivande väggar för stöd tills brukarens vikt tryckfördelas så jämt som möjligt över dynan.

Varje modell av EquaGel använder en tvåstegs cellstruktur. Den övre delen av dynan består av ett litet rutnät av gel som är extra känsligt för tryck, detta övre skikt kallar vi komfortskiktet. Detta övre skikt låter de delar av en brukare som behöver stöd sjunka ner i det undre skiktet som vi kallar stödsiktet.

Kombinationen av dynans mjuka gel och strukturella uppbyggnad ger ett väldigt bekvämt sittande. Då dynan har helt öppna celler erbjuder den brukaren ett otroligt bra mikroklimat. Kombinationen av det mjuka materialet och dynans förmåga att andas ger effektiva trycksårspåbyggande egenskaper. **Utjämningskiva skickas med dynan om detta behövs för hängmattesits.**

- Tillbehörsförteckning

- Standardöverdrag luftgenomsläppligt -
- Inkontinensskyddat överdrag
- Hygienhätta

Tvättråd

Dynan kan ytdeinficeras med på marknaden förekommande medel men ej tvättas i maskin, Lufttorkas
Överdrag tvättas i maskin 60 grader och kan torktumlas.

Brukarinfo/kortinfo:

Teknisk specifikation/Varudeklaration

Materialspekifikation

Bas i Gelstruktur med två skikt. Överdrag i brandskyddad polyester

Storlekar

Finns i sittbredder från 27cm till 55 cm,

Dynan kan specialbeställas i valfri storlek

CE-märkt

Brukarvikt Max 150 kg

1. Tag ur dynan ur påsen. Dynan ligger i sitt överdrag och överdraget är märkt med etiketter som visar hur dynan skall placeras på stolen. iakttag denna märkning, det är viktigt att dynan placeras korrekt.
2. Kontrollera storleken på dynan, om den inte passar så välj en annan storlek.
3. Överdraget är som standard EJ inkontinensskyddat,

Inkontinensskydd kan beställas separat till dynan i form av inkontinensskyddat överdrag.

4. Rengöring och skötsel Nima EquaGel Standards bas är tät. Spola eller handtvätta dynbasen och desinficera t.ex med Virkon. Dynbasen skall ej tvättas i maskin. Plantorka dynbasen eller torka i torkskåp. Överdraget kan tvättas i maskin i 60 grader och tål torktumling och torkskåp.

Mellan två brukare bör alltid dynbas och överdrag tvättas. Notera att dynbasens och överdragets markeringar "fram bak upp ner" så att dynbasen placeras på korrekt sätt i överdraget.

5. Destruering. Uttjänt dyna sorteras under brännbart