




Nima EquaGel Allround

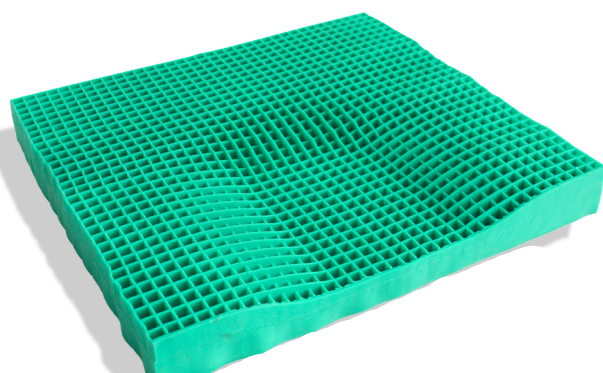

Tryckavlastande dyna i gel för längre tids sittande. Konturerad sittgrop i komfortskiktet. Höjd 7,5 cm.

EquaGel™ är en torr - polymergel som känns nästan gummiliknande vid beröring.

Den viktigaste funktionen är samarbetet cellerna emellan. Varje vägg av en cell är i stånd att stödja endast en lätt belastning, när detta tröskelvärde överskrids fördelas belastningen till omgivande väggar för stöd tills brukarens vikt tryckfördelas så jämt som möjligt över dynan.

Varje modell av EquaGel använder en tvåstegs cellstruktur. Den övre delen av dynan består av ett litet rutnät av gel som är extra känsligt för tryck, detta övre skikt kallar vi komfortskiktet. Detta övre skikt låter de delar av en brukare som behöver stöd sjunka ner i det undre skiktet som vi kallar stödsiktet.

Kombinationen av dynans mjuka gel och strukturella uppbyggnad ger ett väldigt bekvämt sittande. Då dynan har helt öppna celler erbjuder den brukaren ett otroligt bra mikroklimat. Kombinationen av det mjuka materialet och dynans förmåga att andas ger effektiva trycksårspåbyggande egenskaper. Materialets följsamhet gör också att dynan "gungar" i sidled vid små röresler så att skjuvkrafterna tas upp i dynan istället hos brukaren vilket minskar risken för hudrullning och andra skjuvrelaterade problem. Om överdraget tas bort från dynan kan dynan med fördel användas på dushstol eller i badkar

Tvättråd

Dynan kan ytdeinficeras med på marknaden förekommande medel. Den kan även tvättas i maskin 40 grader men dynan måste då vara stilla under tvätten. Överdrag tvättas i maskin 60 grader och kan torktumlas.

Tvättråd dyna



Tvättråd överdrag



Tillbehörsförteckning

- Standardöverdrag luftgenomsläppligt
- Inkontinensskyddat överdrag
- Utjämningskiva
- Hygienpad/absorbent

Vikt 0,8-4,3kg beroende på storlek

Bruksanvisning / Instruktioner för handhavande / Skötselinstruktioner

1. Tag ur dynan ur påsen. Dynan ligger i sitt överdrag och överdraget är märkt med etiketter som visar hur dynan skall placeras på stolen. iakttag denna märkning, det är viktigt att dynan placeras rätt.
2. Kontrollera storleken på dynan, om den inte passar så välj en annan storlek.
3. Överdraget är som standard EJ inkontinensskyddat, Inkontinensskydd kan beställas separat till dynan i form av inkontinensskyddat överdrag.
4. **Rengöring och skötsel** Vid behov eller mellan två brukare: Dynbasen torkas av med desinfektion alternativt med vatten och tvällösning 40°C som förbehandlats med bakteriehämmande medel. Plantorka dynbasen i torkskåp eller genom att låta den stå fritt. Överdraget kan tvättas i maskin i 60 grader och tål torktumling och torkskåp. Mellan två brukare bör alltid dynbas och överdrag tvättas. Notera att dynbasens och överdragets markeringar "fram bak upp ner" så att dynbasen placeras på korrekt sätt i överdraget.
5. **Destruering.** Uttjänt dyna sorteras under brännbart

Fakta/ Teknisk dokumentation

Materialspecifikation

Bas i Gelstruktur med två skikt.
Överdrag i brandskyddad polyester.
Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16
Garanti: 2 år CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745  
Kategori 04 33 03, ISO-kod: 04 33 03 Tryckavlastande dyna. Märkt med EAN-13 streckkod
Förväntad livslängd 5 år
Dynan kan användas i andra sittmöbler
Storlekar Finns i sittbredder från 27cm till 50cm Längd från 27 till 48 cm
Storre storlekar, upp till 55x55 cm finns enligt specialbeställning

Brukarvikt max 150 kg

Dynan kan beskäras med bibehållen CE men endast under låren, inte under sittbensknölna