

**Produktinfo, bruksanvisning, monteringsanvisning, teknisk dokumentation, rekonditioneringsanvisning, brukarinformation, förskrivarinformation och skrotningsanvisning.**

## Nima Kildyna

Tvättråd  
Överdrag:



Tvättråd  
Dyna:



Nimacares Kildynor är kilformade dynor avsedda att ge en framåtlutande sittställning. Dynorna finns med olika lutning beroende på brukarens behov.

Dynorna är tillverkade av kallskum vilket gör dem lätta och mjuka. Dynan finns även med mjukt skum i bakkant för att ge ytterligare avlastning för svanskotan

### **Teknisk dokumentation/Varudeklaration:**

Dynbas av skum, Dynbas : 55kg/m<sup>3</sup>

Överdrag Polyestertyg

Brukarvikt Max 150 kg

Dynan är Brandskyddad och CE märkt.

Vikt 0,5-0,7 kg

### **Bruksanvisning / Instruktioner för handhavande / Skötselinstruktioner**

**1. Tag ur dynan ur påsen.** Dynan ligger i sitt överdrag och överdraget är märkt med etiketter som visar hur dynan skall placeras på stolen.

**2. Kontrollera storleken** på dynan, om den inte passar så välj en annan storlek. Kontrollera också lutningen.

**3. Överdraget** är som standard EJ inkontinensskyddat.

Inkontinensskydd kan beställas separat till dynan i form av inkontinensskyddat överdrag eller hätta med resår.

**4. Rengöring och skötsel** Nimacares dynbaser andas och är inte försedda med vätsketätt ytskikt. Detta gör att dynbasen inte skall tvättas i maskin. Tvätta för hand och desinficera t.ex med Virkon. Plantorka dynbasen. Överdraget kan tvättas i maskin i 60 grader och tål torktumling och torkskåp.

**5. Destruering.** Uttjänt dyna sorteras under brännbart

**6.** Dynan kan beskäras