


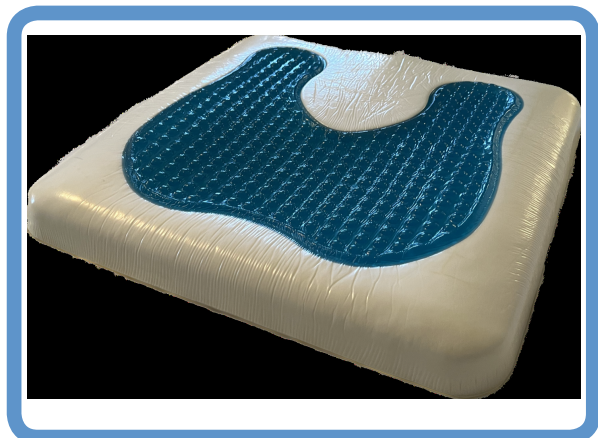

Dyna Nima Smart Gel Visco

Teknisk Specifikation/varudeklaration

Dynans Bas

Trögsaum och Gel

Höjd 5 cm under lår mätt 5 cm från framkant, 5 cm under sittbensknölar, 6 cm vid bendelaren

Material

Dyna: Slabstocksgjutet trögsaum/viscosaum i dynbasen. Fluidgel under sittbensknölar

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år



CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745 Kategori 04 33 03,

ISO-kod: 04 33 03 Tryckavlastande dyna.

Märkt med EAN-13 streckkod

Vikt: 1-2,5 kg beroende på storlek

Förväntad livslängd 5 år

Dynan kan användas i andra sittmöbler men inte beskäras med bibehållen CE

Fasad i hörnen bak för rullstolens rör.

Överdrag: Brandskyddad Polyester

Tvätttråd

Dynbasen kan ytdeinficeras med på marknaden förekommande medel men ej tvättas i maskin.

Överdraget tvättas i maskin 60 grader och kan torktumlas.

Dynans vikt

0,7-2,5 kg, beroende på storlek.

Brukarvikt

Max 150 kg

Nima Smart Gel Visco är en dyna för de som behöver en mjuk och sval sittdyna för kort eller längre tids sittande i rullstol. Dynan avlastar jämt över hela sätesregionen.

Brukaren omsluts av dynans form och sjunker ned i det mjuka viscoelastiska skummet. Gel skiktet är mjukt samtidigt som det ger en sval känsla. Dynan har lätt anatomisk form med bendelare.

Tillbehörsförteckning

- Standardöverdrag
 - Ink skyddat överdrag
 - Hygienhätta
- Dynan är CE Märkt

Bruksanvisning / Instruktioner för handhavande / Skötselinstruktioner/Monteringsanvisning

1. Tag ur dynan ur påsen. Dynan ligger i sitt överdrag och överdraget är märkt med etiketter som visar hur dynan skall placeras på stolen. Dynan kommer färdig ur förpackning och behöver inte ställas in.
2. Kontrollera storleken på dynan, om den inte passar så välj en annan storlek.
3. Överdraget är som standard EJ inkontinensskyddat.

4. Rengöring och skötsel

Rengöring och skötsel. Vid behov eller mellan två brukare: Dynbasen torkas av med desinfektion alternativt med vatten och tvållösning 40°C som förbehandlats med bakteriehämmande medel. Plantorka dynbasen i torkskåp eller genom att låta den stå fritt. Överdraget kan tvättas i maskin i 60 grader och tål torktumling och torkskåp.

5 Skrotningsanvisning. Uttjänt dyna sorteras under brännbart