


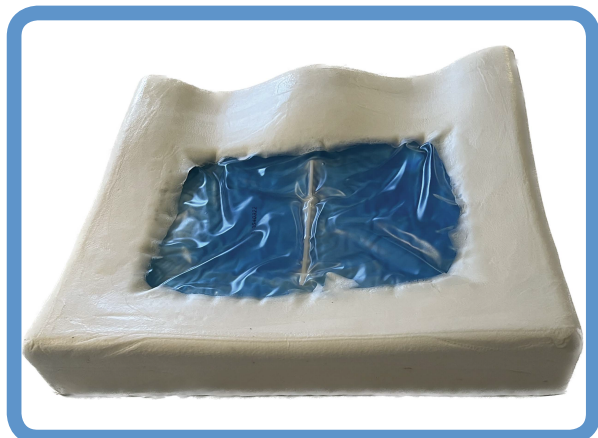

Nima Ecoform Pluma är en dyna för de som behöver en väldigt mjuk och skön dyna med stor avlastning för sittbensknölar och övriga sätesregionen.

Brukaren omsluts av dynans form, sjunker ned i det mjuka viscoelastiska skummet samt får ytterligare tryckavlastning och en sval känsla under sittbensknölarerna genom fluid gelen.

Dynan har anatomisk form med bendelare och lateralstöd.

Dynan kan beskäras med bibehållen CE, dock endas i skumdelen (inte i gel delen)

Dynan kan placeras i andra sittmöbler

- **Tillbehörsförteckning**
- Standardöverdrag
- Ink skyddat överdrag
- Hygienhätta Dynan är CE Märkt

Bruksanvisning / Instruktioner för handhavande / Skötselinstruktioner/Monteringsanvisning

1. Tag ur dynan ur påsen. Dynan ligger i sitt överdrag och överdraget är märkt med etiketter som visar hur dynan skall placeras på stolen. Dynan kommer färdig ur förpackning och behöver inte ställas in.
2. Kontrollera storleken på dynan, om den inte passar så välj en annan storlek.
3. Överdraget är som standard EJ inkontinensskyddat.
4. Gel kan röra sig mellan högra och vänstra gel påsen, dynan bör därför förvaras plant för att båda dessa skall ha lika mängd gel vid första användning.

5. Rengöring och skötsel

Rengöring och skötsel. Vid behov eller mellan två brukare: Dynbasen torkas av med desinfektion alternativt med vatten och tvållösning 40°C som förbehandlats med bakteriehämmande medel. Plantorka dynbasen i torkskåp eller genom att låta den stå fritt. Överdraget kan tvättas i maskin i 60 grader och tål torktumling och torkskåp.

5 Skrotningsanvisning. Uttjänt dyna sorteras under brännbart

Dyna Nima Ecoform Pluma

Teknisk Specifikation/ varudeklaration

Dynans Bas

Trögsaum och Gel

Höjd 5,5 cm under lår, 6,5 cm under sittbensknölar, 7,5 cm vid bendelaren

Material

Dyna: Slabstocksgjutet trögsaum/viscosaum i dynbasen. Fluidgel under sittbensknölarerna

Överdrag: Brandskyddad Polyester

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745 Kategori 04 33 03, **MD CE**

ISO-kod: 04 33 03 Tryckavlastande dyna.

Märkt med EAN-13 streckkod

Vikt: 1-2,5 kg beroende på storlek

Förväntad livslängd 5 år

Dynan kan användas i andra sittmöbler men inte beskäras med bibehållen CE

Fasad i hörnen bak för rullstolens rör.

Finns även i en version med avfasade sidor undertill för att passa i hängmattensits, denna heter Nima Ecoform Pluma Rundad.

Tvättråd

Dynbasen kan ytdeinficeras med på marknaden förekommande medel men ej tvättas i maskin.

Överdraget tvättas i maskin 60 grader och kan torktumlas.

Dynans vikt

0,7-2,5 kg, beroende på storlek.

Brukarvikt

Max 150 kg