

Art i 45x45 cm: nr:ECOPS4545

Nima Ecoform Pluma Skikt

Är en dyna för de som behöver en väldigt mjuk och skön dyna med stor avlastning för sittbensknölar och övriga sätesregionen.

Brukaren omsluts av dynans form, sjunker ned i det mjuka viscoelastiska skummet samt får ytterligare tryckavlastning och en sval känsla under sittbensknölarne genom fluid gelen.

Dynan har anatomisk form med bendelare och lateralstöd.

Fakta / Teknisk dokumentation/varudeklaration

Material

Dyna: Formgjutet viscoskum i dynbasen, Gelpad under sittbensknölarne, mjuk Polyeter i som toppskikt.

Överdrag: Polyestertyg

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745 Kategori 04 33 03,

ISO-kod: 04 33 03 Tryckavlastande dyna. **MD** **CE**

Märkt med EAN-13 streckkod

Vikt: 1-2,5 kg beroende på storlek

Förväntad livslängd 5 år

Dynan kan användas i andra sittmöbler men inte beskäras med bibehållen CE

Fasad i hörnen bak för rullstolens rör.


Finns även i en version med avfasade sidor undertill för att passa i hängmattensits, denna heter Nima Ecoform Pluma Skikt Rundad.

Höjd 8 cm under lår, 8,5 cm under sittbensknölar, 9,5 cm vid bendelaren

Brukarvikt

Max 150 kg upp till och inklusive storlek 45x45 cm Max 200 kg i storlek 45x45<50x45 cm

Max 250 kg i storlek 50x45 cm och över.

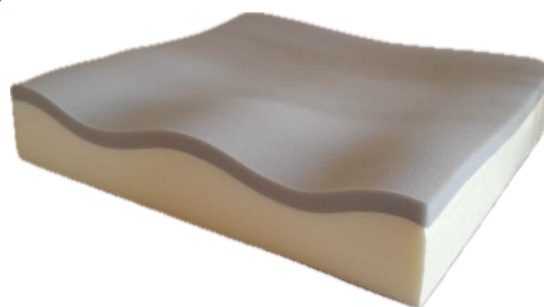

Färdig dynas bas med mjukt skum i toppskikt



Dynans bas, viscoskum med gel ilägg

- Tillbehörsförteckning
- Standardöverdrag
- Ink skyddat överdrag
- Hygienhätta
- 3d Mesh överdrag

Tvättråd
Överdrag:  

Tvättråd
Dyna:  

Bruksanvisning / Instruktioner för handhavande / Skötselinstruktioner/Monteringsanvisning

1. Tag ur dynan ur påsen. Dynan ligger i sitt överdrag och överdraget är märkt med etiketter som visar hur dynan skall placeras på stolen. Dynan kommer färdig ur förpackning och behöver inte ställas in.
2. Kontrollera storleken på dynan, om den inte passar så välj en annan storlek.
3. Överdraget är som standard EJ inkontinensskyddat.
4. Rengöring och skötsel. Vid behov eller mellan två brukare: Dynbasen torkas av med desinfektion alternativt med vatten och tvållösning 40°C som förbehandlats med bakteriehämmande medel. Plantorka dynbasen i torkskåp eller genom att låta den stå fritt. Överdraget kan tvättas i maskin i 60 grader och tål torktumling och torkskåp.
5. Skrotningsanvisning. Uttjänt dyna sorteras under brännbart