



Dyna Nima 600 Tät

Beskrivning

Dynan är en dyna för de som behöver en helt vätsketät dyna med hög tryckavlastning för hela sittytan. Dynan har anatomisk form med sittgrop, dynans skum är mjukt och anpassar sig till brukaren och låter denne sjunka ned i dynan. Hela dynan består av tryckavlastande material vilket gör detta till en dyna som ger ett behagligt och tryckavlastande sittande.

Fasade kanter på dynans undersida för att passa i både hängmattesits och plansits.

Tillbehörsförteckning

- Extra Inkontinensskyddat
överdrag finns som tillbehör

Tryckavlastande allrounddyna med anatomisk form. Dynan är täckt av ett lager Polyuretanbelagd polyester vilket gör den vätsketät.

Teknisk Specifikation/varudeklaration

Material

Dyna: Slabstocksgjuten polyuretan i dynbasen. Täckt av ett lager polyuretan som ångändas.

Överdrag: Polyestertyg

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745

Kategori 04 33 03, ISO-kod: 04 33 03 Tryckavlastande dyna.

Märkt med EAN-13 streckkod

Vikt: 1-2 kg beroende på storlek

Förväntad livslängd 5 år

Dynan kan användas i andra sittmöbler men inte beskäras med bibehållen CE



Brukarvikt

Max 150 kg upp till och inklusive storlek 45x45 cm

Max 200 kg i storlek 45x45<50x45 cm

Max 250 kg i storlek 50x45 cm och över

Fasad i underkant för att passa väl i plan såväl som hängmattesits samt i hörnen bak för rullstolens rör.

Tvättråd

Dynbasen kan yttdecimeras med på marknaden förekommande medel men ej tvättas i maskin. Pu "påsen" som täcker dynan är lätt att tex sprita av eller torka med annan desinfektion och torkar omedelbart.

Överdraget tvättas i maskin 60 grader och kan torktumlas.

Tvättråd
Överdrag:
Tvättråd
Dyna:



Bruksanvisning / Instruktioner för handhavande / Skötselinstruktioner/Monteringsanvisning

1. Tag ur dynan ur påsen. Dynan ligger i sitt överdrag och överdraget är märkt med etiketter som visar hur dynan skall placeras på stolen.

2. Kontrollera storleken på dynan, om den inte passar så välj en annan storlek.

3. Dynan kommer färdig i förpackning och kräver inga inställningar.

4. Rengöring och skötsel: Dynan är försedd med vätsketätt ytskikt. Detta är väldigt enkelt att sprita av eller tvätta av med andra i vården förekommande medel.

Överdraget kan tvättas i maskin i 60 grader och tål torktumling och torkskåp. För rekonditionering mellan två brukare, följ ovan.

5 Skrotningsanvisning. Uttjänt dyna sorteras under brännbart