



Nima Ecoform Pluma Adjuster

Nima Ecoform Pluma Adjuster är en dyna för de som behöver en väldigt mjuk och skön dyna med stor avlastning för sittbensknölar och övriga sätesregionen.

Brukaren omsluts av dynans form, sjunker ned i det mjuka viscoelastiska skummet samt får ytterligare tryckavlastning och en sval känsla under sittbensknölar genom fluid gelen. Fluid gelen komprimeras inte utan förflyttar sig från områden med högre tryck till mindre tryck (även mellan vänstra gelpåsen till högra gelpåsen via små öppningar fram och bak) vilket anpassar den till brukarens anatomi. Viscoskummet komprimeras vid tryck och avlastar. Dynan har anatomisk form med bendelare och lateralstöd.

Dynan kan beskäras med bibehållen CE, dock endas i skumdelen (inte i gel delen)

Dynan kan placeras i andra sittmöbler och anpassas för brukaren med stödkilar

Dyna Nima Ecoform Pluma Adjuster

Fakta / Teknisk dokumentation/varudeklaration
Material

Dyna: Formgjutet viscoskum i dynbasen, Gelpad under sittbensknölar

Överdrag: Polyestertyg

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745 Kategori 04 33 03, ISO-kod: 04 33 03 Tryckavlastande dyna.

Märkt med EAN-13 streckkod

Vikt: 1-2,5 kg beroende på storlek

Förväntad livslängd 5 år

Dynan kan användas i andra sittmöbler men inte beskäras med bibehållen CE

Fasad i hörnen bak för rullstolens rör.

Finns även i en version med avfasade sidor undertill för att passa i hängmattesits, denna heter Nima Ecoform Pluma Rundad.

Höjd 5,5 cm under lår, 6,5 cm under sittbensknölar, 7,5 cm vid bendelaren

Brukarvikt: Max 150 kg

Tvättråd

Överdrag:



Tvättråd

Dyna:



Tillbehörslista:

Produktnamn	Art nr	Produktnamn	Storlek	Beskrivning
Abduktionskil	ABDK1	Nima Abduktionskil	2-0 cm	Bendelförhöjning, placeras på bendelaren med kardborre för att ytterligare höja denna
Främre kil	Fkil	Nima Främre Kil	25 cm djup 2,5-0,5 cm	Lutar dynan bakåt för att motverka famåtgångning/skjuvning, Denna kan beskäras för att passa dyna samt delas på halva dynans yta för att uppnå förhöjning under endast ett ben. Placeras under dynan med kardborre
Oval främre kil	OFkil	Nima Oval främre Kil	25 cm djup 3,5-2,5-0,5 cm	Lutar dynan bakåt för att motverka famåtgångning/skjuvning, Denna kan beskäras för att passa dyna samt delas på halva dynans yta för att uppnå förhöjning under endast ett ben. Placeras under dynan med kardborre. Samma funktion som ovan men oval undersida för att passa hängmattesits
Lateral kil	LKIL	Nima Lateral Kil	2-0,5 cm djup 12 cm	Placeras under dynans sidor för att luta dynan sidledes och ge lateralt stöd
Gradvis kil	Gkil	Nima Gradvis Kil	Rektangulär, 2 cm höga sidan, 0,5 låga sidorna	Sluttande kil som kan placeras i främre eller bakre hörnen på dynan för att ge extra stöd och justering
Standardöverdrag	Övxxxx	Nima Överdrag	xxx	Standardöverdrag till befintlig dyna
Ink Skyddat överdrag	ÖVINKxxx	Nima Överdrag INK	xxx	Ink överdrag till befintlig dyna
Hygienhätta	NHxxxx	Nima Hygienhätta	xxx	Hygienhätta, generell hätta som passar olika produkter

Bruksanvisning / Instruktioner för handhavande / Skötselinstruktioner/Monteringsanvisning

1. Tag ur dynan ur påsen. Dynan ligger i sitt överdrag och överdraget är märkt med etiketter som visar hur dynan skall placeras på stolen. Dynan kommer färdig ur förpackning och behöver inte ställas in.
2. Vid justeringsbehov, fäst kilar vid dynans framsida eller sidor enligt behov
3. Kontrollera storleken på dynan, om den inte passar så välj en annan storlek.
4. Överdraget är som standard EJ inkontinensskyddat.
5. Rengöring och skötsel. Vid behov eller mellan två brukare: Dynbasen torkas av med desinfektion alternativt med vatten och tvällösning 40°C som förbehandlats med bakteriehämmande medel. Plantorka dynbasen i torkskåp eller genom att låta den stå fritt. Överdraget kan tvättas i maskin i 60 grader och tål torktumling och torkskåp.
6. Skrotningsanvisning. Uttjänt dyna sorteras under brännbart